



PENGGUNAAN STETOSKOP YANG BETUL HOW TO WEAR A STETHOSCOPE CORRECTLY



Gambar rajah / Diagram 1:
*Tip telinga berlawanan arah /
Ear tips pointing forward*

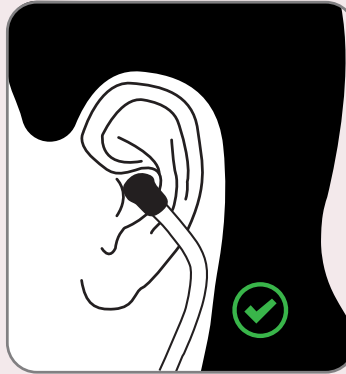


Gambar rajah / Diagram 2:
*Penggunaan yang betul /
Correct Positioning*

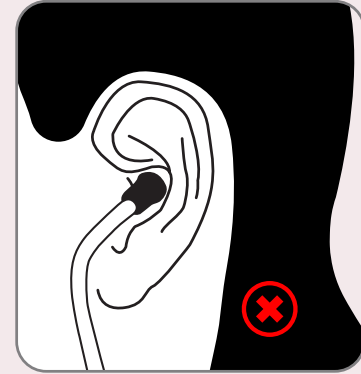


Gambar rajah / Diagram 3:
*Penggunaan yang salah /
Incorrect Positioning*

PENGGUNAAN STETOSKOP YANG BETUL HOW TO WEAR A STETHOSCOPE CORRECTLY

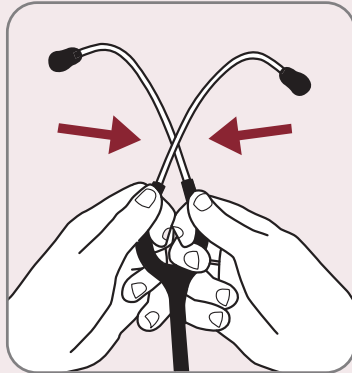


Gambar rajah / Diagram 4:
Tekan untuk menambah ketegangan /
Squeeze to increase tension

Perhatian! / Caution!
Berhati-hati. Jangan bengkokkan secara berlebihan kerana boleh menyebabkan kerosakan pada alat dengar.
Be careful. Do not over bend as it may cause damage to the binaural

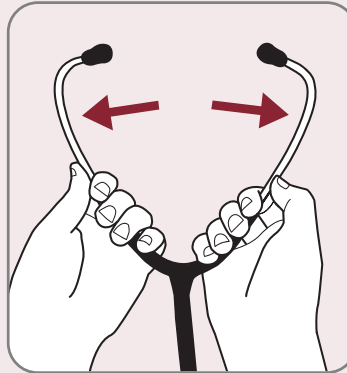

Gambar rajah / Diagram 5:
Tarik untuk mengurangkan ketegangan /
Pull away to loosen tension

Perhatian! / Caution!
Berhati-hati. Jangan bengkokkan secara berlebihan kerana boleh menyebabkan kerosakan pada alat dengar.
Be careful. Do not over bend as it may cause damage to the binaural

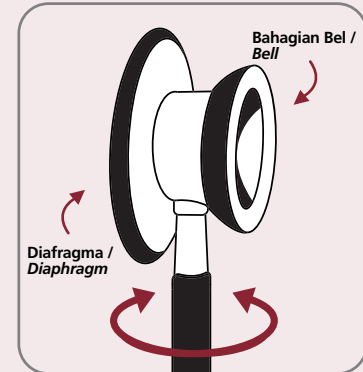

Gambar rajah / Diagram 6:
Putar pengesan dada
(Bel-Bunyi berfrekuensi rendah) /
Diafragma-Bunyi berfrekuensi tinggi)
untuk mendengar bunyi /
Rotate the chest piece (Bell- Low Frequency
Sound / Diaphragm-High Frequency
Sound) to hear the sound