

Penyelesaian pernafasan 3 dalam 1 / 3in1 Respiratory Solution

Model: NK1000



Nebulizer Kit
N1



Pencuci Rongga Hidung /
Nasal Washer
NW1



Penyedut rongga Hidung /
Nasal Aspirator
NS1

Product Reg. No.: GB7398020-40139

3BREATH
3IN1 RESPIRATORY SOLUTION

Penyelesaian Pernafasan Lengkap /
Complete Respiratory Solution
NEBULIZER / NEBULIZER
PENYEDUT RONGGA HIDUNG / NASAL ASPIRATOR
PENCUCI RONGGA HIDUNG / NASAL WASHER

Rossmax 3BREATH adalah nebulizer pemampat 3 dalam 1 yang bergabung dengan pencuci rongga hidung dan penyedut rongga hidung. Nebulizer membolehkan ubat dihantar ke saluran udara atas dan pinggir paru-paru / Rossmax 3BREATH is a 3in1 compressor nebulizer that integrates with a nasal washer and a nasal aspirator. The nebulizer enables medication delivered to the upper airways and lung periphery.

VA
technology

Teknologi Injap Boleh Dilaras /
Valve Adjustable Technology (VAT)
KAWALAN KADAR NEBULISASI DENGAN SAIZ PARTIKEL
KONSISTEN / CONTROLLABLE NEBULIZATION RATE AT
CONSISTENT PARTICLE SIZE

Teknologi injap boleh dilaras mampu menyampaikan ubatan dengan tahap kelikatan yang berbeza mengikut keadaan dan keperluan pengguna dengan selesa. Teknologi VAT kami membolehkan pengguna menyesuaikan kadar nebulisasi antara 0.10-0.30 ml/min pada ukuran saiz partikel yang konsisten tanpa perlu menukar mana-mana bahagian.

The proprietary adjustable valve is able to deliver medications of different viscosity level according to every user's conditions and needs at ease. Our VA technology allows users to adjust different levels of nebulization rate ranging from 0.10 – 0.30 ml/min at consistent particle size that can be adjusted by the user without exchanging parts.

1. Nebulizer Piston / Piston Nebulizer

Botol dengan teknologi VA membolehkan pengguna menyesuaikan kadar nebulisasi antara 0.10 (tutup) -0.30 (buka sepenuhnya) ml/min pada ukuran saiz partikel yang konsisten. / The VA Technology bottles allows users to adjust different levels of Nebulization rate 0.1 (closed) / 0.3 (fully open) ml/min at consistent particle size.

- MMAD $\leq 2.5 \mu\text{m}$; Dos Partikel Halus (FPD): 80-85% / MMAD $\leq 2.5 \mu\text{m}$ Fine Particle Dose (FPD): 80-85%
- Botol nebulizer dengan injap boleh laras (VAT) / Valve Adjustable nebulizer bottle (VAT)
- Bunyi terhasil rendah dengan alat penenyap dan reka bentuk menyerap getaran / Low noise with silencer and vibration absorber design

2. Pencuci Rongga Hidung / Nasal Washer

- Melancarkan rongga hidung dan rhinopharynx untuk membersihkan rembesan, lendir dan bahan berbahaya dan mengurangkan gejala alahan. / Flushes nasal cavities and rhinopharynx to clear secretions, mucus and harmful substances and alleviates allergic symptoms.
- Pencuci rongga hidung mengamburkan 10ml larutan dalam 2 minit / Nasal washer nebulizes 10ml of solution in about 2 minutes.
- Penyesuai hidung silikon mempunyai sentuhan yang selesa dan lembut dan meterai yang boleh dipercayai / Silicone nasal adaptors provide comfortable and soft touch and reliable seal.
- Diperbuat daripada bahan bio-kompatibel dan tidak menyebabkan alahan. / Made of biocompatible and non-allergenic materials.
- Didatangkan dengan 3 saiz penyesuai hidung untuk semua peringkat umur. / Comes with 3 sizes of nasal adaptors and suits all ages.
- Kapasiti ruang cecair: Maksimum 20ml / Fluid chamber capacity: Max 20ml

3. Penyedut rongga Hidung / Nasal Aspirator

- Menyedut lendir untuk melegakan penafasan dengan membersihkan hidung yang tersumbat. Reka bentuk pam Dual, pam penyedut dan penyedut, memberikan kebersihan maksimum untuk mengelakkan jangkitan silang. / Removes mucus to alleviate nasal congestion by clearing a blocked nose. Thanks to the Dual pump design, nebulization and suction pump, provides the maximum hygiene to avoid cross infection.
- Tahap vakum boleh laras / Adjustable vacuum level.
- Reka bentuk ergonomik untuk memastikan kelancaran operasi / Ergonomic design to ensure a smooth operation.
- Vakum maksimum @ Salur masuk pam : $\leq -450 \text{ mmHg}$ / Max vacuum @ pump inlet: $\leq -450 \text{ mmHg}$
- Aliran udara maksimum @ salur masuk pam : $\geq 5.0 \text{ lpm}$ / Max air flow @ pump inlet: $\geq 5.0 \text{ lpm}$